

tropicalgin



RIDE THE COLOURS !



Clinical
Chromatic Alginate

Zhermack®
CLINICAL



tropicalgin

Lăsați culoarea sa va îndrume!

CARACTERISTICI EXCLUSIVE

ZHERMACK prezintă *alginatul, cromatic, cu priza rapida*

- Are 3 faze distincte:

- culoare roșie: *amestecare*



45" max

- culoare portocalie:

timp de lucru



1'35"

De la începutul amestecării

- culoare galbenă:

*introducerea în
cavitatea bucală*



2'35"

Timp de lucru



- timpi de *lucru și priză rapizi*
- consistența *tixotropica*
- rigiditate după efectuarea prizei
- recuperare elastică excelentă
- rezultate de încredere



INDICATII

TROPICALGIN este ideal pentru:

- proteze mobile
- modele de studiu
- antagoniști pentru proteze fixe și mobile
- amprente pentru coroane și punți provizorii

tropicalgin



AROMĂ TROPICALĂ

Aroma *tropicala* este considerata de catre pacient foarte placuta.



DATE TEHNICE

Timp de amestecare	45" max
Timp de lucru*	1' 35"
Timp de actionare în cavitatea bucală	1'
Timp de efectuare a prizei	2' 35"
Recuperare elastică	99%
Deformare permanentă	11,5%
Rezistență la comprimare	1,4 MPa

*De la începutul amestecării

O GAMĂ LARGĂ DE ACCESORII



Castron pentru mixare din cauciuc flexibil,
set de masurare și spatule



Lingura de amprentare de calitate
superioara si detergent Algitray



Ambajul

C302240 TROPICALGIN	1 pungă 453 g
C302242 TROPICALGIN INTRO KIT	2 pungii x 453 g + set de masurare + recipient
C302245 TROPICALGIN	1 plic monodoză de 18 g
C302070 HYDROGUM 5	1 pungă 453 g
C302071 HYDROGUM 5 INTRO KIT	2 pungii x 453 g + set de masurare + recipient
C302025 HYDROGUM	1 pungă 500 g
C302041 HYDROGUM INTRO KIT	2 pungii x 500 g + set de masurare + recipient
C302205 NEOCOLLOID	1 pungă 500 g
C302221 NEOCOLLOID INTRO KIT	2 pungii x 500 g + set de masurare + recipient
C302145 ORTHOPRINT	1 pungă 500 g
C302161 ORTHOPRINT INTRO KIT	2 pungii x 500 g + set de masurare + recipient
C302086 PHASE PLUS	1 pungă 453 g
C302102 PHASE PLUS INTRO KIT	2 pungii x 453 g + set de masurare + recipient

Echipament

C303000	ALGHAMIX Malaxor automat pentru alginat (230 V)
C303040	ALGHAMIX Malaxor automat pentru alginat (115 V)

Accesorii

C300990	SPATULĂ PENTRU ALGINAT set de 6 spatule
U113280	BOL DE MIXARE DIN CAUCIUC FLEXIBIL
C300960	LONG LIFE BAG 100 pungii
C400431	ALGITRAY LIQUID detergent pentru îndepărtarea alginatului de pe lingura de amprenta. Sticla de 2 l
C400430	ALGITRAY POWDER tub de 1 kg + set de masurare
C303010	BOL DE MIXARE DIN CAUCIUC FLEXIBIL PENTRU ALGHAMIX
C300900	1 set de măsuri mici pentru Hydrogum 5 (1 măsură mică de apă + 1 măsură mică de praf)
C300910	1 set de măsuri mici pentru alginat (1 măsură mică de apă + 1 măsură mică de praf)

HI-TRAY METAL Pachet de linguri de amprentare metalice

D5K10S	1 kit de 10 linguri de amprentare superioare și inferioare SOLID
D5K10P	1 kit de 10 linguri de amprentare superioare și inferioare PERFORATED
D5K08S	1 kit de 8 linguri de amprentare superioare și inferioare SOLID
D5K08P	1 kit de 8 linguri de amprentare superioare și inferioare PERFORATED
D5K06S	1 kit de 6 linguri de amprentare superioare și inferioare SOLID
D5K06P	1 kit de 6 linguri de amprentare superioare și inferioare PERFORATED

Branch
Zhermack GmbH Deutschland
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl
Tel. +49 - 0 54 43 / 20 33 - 0
Fax +49 - 0 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.com

Branch
Zhermapol Sp. z o.o.
ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska
Tel. +48 - 22 858 82 72 - 858 73 41
Fax +48 - 22 642 07 14
zhermapol@zhermapol.pl
www.zhermack.com

Branch
Zhermack Inc.
151 Industrial Way East Bldg B
Eatontown, NJ 07724
Phone +1 - 732 389 8540
Fax +1 - 732 389 8543
info.usa@zhermack.com
www.zhermack.com

Representative Office
Zhermack UK and Ireland
21 Balmoral Road
Melton Mowbray - Leics.
LE13 1JN
Tel. +44 - (0)7870 690811
uk@zhermack.com
www.zhermack.com

Representative Office
Zhermack Russia
5/2 Marshala Vasilevskogo St.
123098 Moscow - Russia
Tel. +7 916 9301191
info.russia@zhermack.com
www.zhermack.com

Zhermack SpA

Via Bovazecchino, 100 - 45021 Badia Polesine (RO) ITALY
Tel. +39 - 0425 597611 Fax +39 - 0425 53596 info@zhermack.com www.zhermack.com

Zhermack®
BEYOND INNOVATION

HI-TRAY LIGHT CLEAR 12 buc

		MĂRIME			
		Small	Medium	Large	Partial
TIP	Upper	D5CSUP	D5CMUP	D5CLUP	D5CPUP
	Lower	D5CSLO	D5CMLO	D5CLLO	-
	Left	-	-	-	D5CPL
	Right	-	-	-	D5CPR

HI-TRAY LIGHT PLASTIC 12 buc

		MĂRIME			
		Small	Medium	Large	Partial
TIP	Upper	D5GSUP	D5GMUP	D5GLUP	D5GPUP
	Lower	D5GSLO	D5GMLO	D5GLLO	-
	Left	-	-	-	D5GPL
	Right	-	-	-	D5GPR

HI-TRAY METAL SOLID

		MĂRIME				
		1	2	3	4	5
TIP	Upper	D51SS	D52SS	D53SS	D54SS	D55SS
	Lower	D51IS	D52IS	D53IS	D54IS	D55IS

HI-TRAY METAL PERFORATED

		MĂRIME				
		1	2	3	4	5
TIP	Upper	D51SP	D52SP	D53SP	D54SP	D55SP
	Lower	D51IP	D52IP	D53IP	D54IP	D55IP